

ソリッドジェルパッド



エコー検査の際に使用されている
液状ジェルの発展品として開発された固形状ジェルパッド

※ 本品は非滅菌で、医療機器に非該当です。

製品特徴

従来の液状ジェルでは適用が困難な湾曲部位にも当てることができ
使いやすさに大変優れた製品となっております。

1. 体のあらゆる表皮部位のエコー検査に適用
2. エコー検査時の液状ジェル塗布が不要
3. 衛生と安全に配慮した使い捨て製品
4. 使用後の拭取り処理が容易
5. 均一的なエコーの透過が可能
6. 使用時の不快感を減少（ソフトなクッション感）

サイズ

丸型（直径 9cm）
厚さ：7mm
（厚みや形の異なるサイズ展開も準備中）

使用方法

1. 手で丁寧にパッケージから取り出します。
（強いダメージを加えたり圧力を与えると破損する可能性があります。）
 2. ソリッドジェルパッドを検査部位に当てます。
 3. エコープローブをソリッドジェルパッドの上に当てて検査を行います。
 4. 使用後は幹部から外し廃棄します。
- ※ 衛生上の観点により使い捨ての単回使用向けとなります。



エコー画像診断写真比較

ソリッドジェルパッドが密着することで安定した
エコー画像を得ることができます。



対象となる主な部位


- ▶ 膝・肘
 - ▶ 手の甲・手首
 - ▶ 足の甲・足首
 - ▶ 首（甲状腺・頸動脈）
- ※ その他（腹部・胸部・頭部・上肢・下肢）
にも使用可能です。

販売代理店
お問い合わせ、ご用命は下記まで

製造：

 **BLUEMTECH**

販売元：

 **株式会社濱田コーポレーション**
東京都中央区銀座5丁目9番12号
ダイヤモンドビル8F